

Gebrauchsanweisung

Rapskissen

400 Gramm | ArtNr 22000 | PZN 7781897
100 Gramm | ArtNr 22001

Artikelbeschreibung

Wachswerk-Rapskernkissen sind mit Rapskernen gefüllte Baumwollkissen, in vier Kammern unterteilt. Rapskerne zeichnen sich durch eine sehr glatte staubfreie Oberfläche aus und sind daher besonders für Hausstaub-Allergiker und den Einsatz im professionellen Bereich geeignet.

Erlaubtes Zubehör

Wachswerk-Wärmeschrank, Schonbezüge, WachsÖlFolien

Hersteller



Wachswerk Dirk Otto e.K., Schuirweg 85, 45133 Essen, +49(0)201 95979180, www.wachswerk.de

Zweckbestimmung

Wärmekissen zum indirekten Erwärmen der Wachswerk-Wickel oder als direkte Wärmeanwendung

Hinweise zur sicheren Anwendung der Rapskissen

Die Verwendung der Rapskissen ist ausschließlich geschultem Personal vorbehalten.



Erhitzen der Rapskissen – nie (niemals!) in der Mikrowelle!

Wirklich nie in der Mikrowelle erhitzen – es funktioniert nicht und das Rapskissen verbrennt in sehr charakteristischer Weise unter starker Rauchentwicklung. **WACHSWERK ÜBERNIMMT FÜR DAMIT VERBUNDENE FEUERWEHREINSÄTZE KEINE HAFTUNG!** Die ordnungsgemäße thermische und hygienische Aufbereitung ist ausschließlich in den von Wachswerk dazu zugelassenen Wärmeschränken möglich, in diesem Zusammenhang ergibt sich auch die Temperatur der Wärmekissen. Die Rapskissen werden unter Berücksichtigung einer chronologischen Abfolge entnommen/eingelegt, durch die eine hinsichtlich der hygienischen Aufbereitung ausreichende Hitzexposition sichergestellt ist. Nach der Entnahme aus dem Wärmeschrank wird das heiße Rapskissen in einen Schonbezug eingelegt. Das weitere Vorgehen bitte wie folgt.

Als Wärmekissen

Das Rapskissen ist als einfaches Wärmekissen bei Schmerzen in Muskeln und Gelenken, bei Schüttelfrost und kalten Füßen und überhaupt immer bei erhöhtem Wärmebedarf anwendbar. Das Rapskissen darf mit einem ausreichend dicken Frotteetuch zwischen Rapskissen und Haut auf die betroffenen Stellen oder zB an die Füße gelegt werden. Dort darf es auf unbestimmte Zeit verbleiben und muss anschließend in den Wärmeschrank zurück gelegt werden.

Als Wärmeträger mit WachsÖlWickeln

In Verbindung mit den WachsÖlWickeln ist das Rapskissen der Wärmeträger. Hierbei wird die WachsÖlFolie indikationsabhängig platziert direkt auf die Haut gelegt und mit einem Wachswerk-Merino Wollvlies bedeckt. Darauf wird das erwärmte Rapskissen gelegt.

Indikationen

Chronische und akute Schmerzen, mit Kälte-Symptomen einhergehende chronische Erkrankungen, Arthrosen, chronische Gelenkentzündungen, muskuläre Verspannungen, Zustände nach Traumata, Entzündungen des Urogenitaltraktes, Menstruationsschmerzen, Erkältungskrankheiten u.v.m.

Weitere Hinweise in den spezifischen Beschreibungen der WachsÖlFolien.

Lokalisation, Dauer, Häufigkeit der Anwendung

Der Anwendungsbereich der WachsÖlWickel ergibt sich aus der Indikation der jeweils verwendeten WachÖlFolie.

Kontraindikationen und Ausschlüsse

Für die Anwendung der Rapskissen als einzelnes Wärmekissen sind keine Kontraindikationen bekannt.

Bei Anwendung mit WachsÖlFolien ergeben sich mögliche Kontraindikationen aus den jeweils verwendeten WachÖlFolie.



Nutzungsumgebung

Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen! Direkten Hautkontakt vermeiden!

Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

Die Desinfektion geschieht durch entsprechende Hitzeeinwirkung. Keine Wisch-, Sprüh- oder sonstigen Desinfektionsverfahren anwenden! Rapskissen sind nicht waschbar.

Außerbetriebnahme

Rapskissen müssen bei sichtbaren Verschmutzungen oder Undichtigkeiten entsorgt werden.

Risiken und Nebenwirkungen

Verbrennungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung!

